




Das Testkit nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nach dem Gebrauch sollten die Materialien als biogefährlicher Abfall unter Einhaltung der vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

Bringen Sie die Probe und die Testkomponenten ggf. auf Raumtemperatur (15–30°C) und legen Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung an.


Probenentnahme

Nasenrachen-Abstrich ODER Nasen-Abstrich

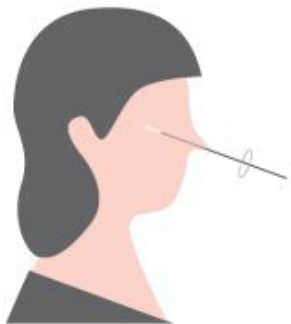

Nasenrachen-Abstrich

Den sterilen Abstrichtupfer vorsichtig in ein Nasenloch des Patienten einführen, in einer Drehbewegung mehrmals behutsam über die hintere Wand des Nasenrachen-Raums streichen, dann vorsichtig wieder herausziehen.

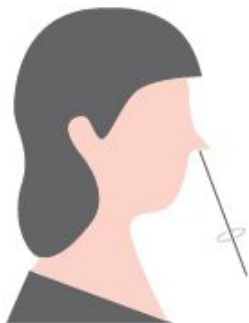

Nasen-Abstrich

Den sterilen Abstrichtupfer vorsichtig in ein Nasenloch des Patienten einführen (2–4 cm), in einer Drehbewegung fünfmal über die Schleimhaut streichen, um Schleim und Zellen aufzunehmen, dann vorsichtig wieder herausziehen. Den Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen.

Probenaufbereitung



10 Tropfen (ca. 300 µl) des Probenextraktionspuffers in das aufrecht positionierte Extraktionsröhrchen geben (mitgelieferten Ständer verwenden).

Tupfer mindestens sechs Mal im Röhrchen drehen, gegen Boden und Innenwand des Röhrchens drücken, eine Minute stehen lassen und dann noch mehrmals andrücken.

Tupfer sicher entnehmen und entsorgen und Tropfkappe auf das Röhrchen mit der Probe aufsetzen.

Testkassette flach hinlegen, kennzeichnen und vier Tropfen (ca. 100 µl) der zu testenden Probe in die Vertiefung geben. Ergebnisse liegen nach 15 Minuten vor. Ergebnis nach 20 Minuten nicht mehr interpretieren.

Mögliche Ergebnisse

